


[안전손잡이 사용 /설치설명서]

안전을 위해 사용설명서와 주의사항을 충분히 읽고 사용하여 주십시오.

Made in KOREA. Cebien Co.,Ltd

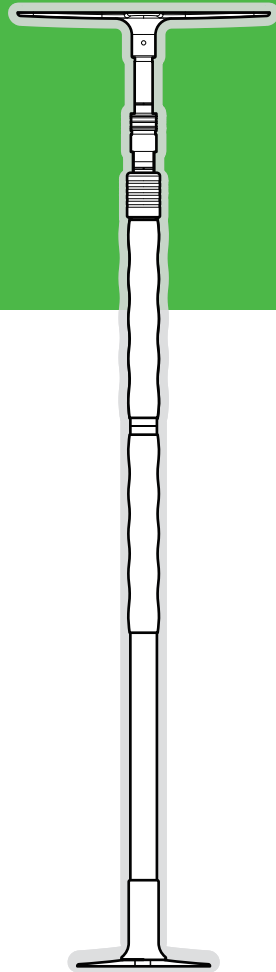

안전손잡이
Safety Grab Bar

모델명 : **CV200**



단체표준명	안전손잡이
단체표준번호	KSPA 5001
인증번호	제 762호 (20200910-1)
품목명 및 제품명	안전손잡이(CV200)
제조년월	(제품박스에 표기)
제조사명	세비양(주)
A/S	070-4667-5004
제조국	한국

품질보증

본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함.
(사)한국고령친화용품산업협회


제품 설명서

본제품은 고령자 및 거동이 불편한 사람이 실내 공간에서 몸을 지지 하거나 지탱하기 위해 사용 하는 안전손잡이 입니다.

제품사양

1. 품목명 : 안전손잡이
2. 제품명 : CV200
3. 중 량 : 5.0KG
4. 안전작동하중 : 80KG
5. 재질 : 알루미늄, SILICON
6. 사이즈
-파이프 : $\varnothing 40, \varnothing 32, \varnothing 27$
-천정지지대: 380x380(mm)
-바닥지지대: $\varnothing 200$
- 7.설치가능범위 : 1,725~2,500(mm)

제품구성

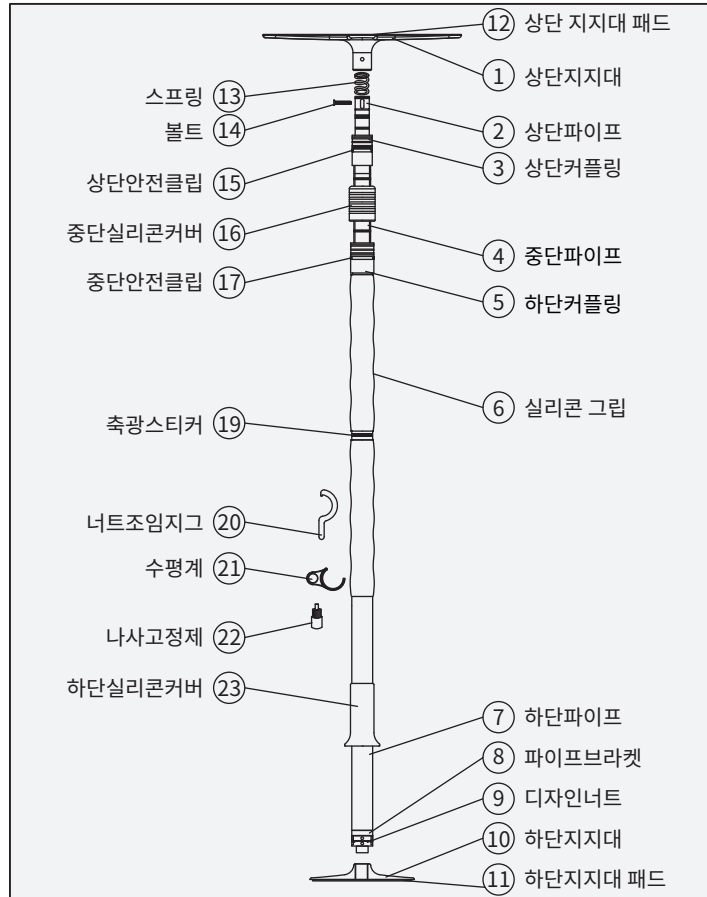

사용상 주의사항 ⚠

1. 안전손잡이 이외의 용도로 사용하지 마십시오. 제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.
2. 설치면 바닥부분에 수분,유분 그리고 이물질등이 닿지 않도록 하십시오. 미끄러져 심각한 상해의 원인이 될 수 있습니다.
3. 상방향으로 들어 올리거나 힘이 가해지도록 하지 마십시오.
4. 심하게 밀거나 당기는 등 과격한 충격을 의도적으로 가하거나, 무리하게 체중을 가하지 마십시오.
5. 임의로 분해, 개조, 수리하지 마십시오.
6. 천정 및 바닥이 평평하지 않거나 불안정한 곳에는 사용하지 마십시오.
특히 아래에 명기된 천정재에는 설치하지 마십시오.
(석고보드, 텍스, PVC, SMC 천정재)
7. 세척 및 소독을 위해 염소계 및 신나, 크레졸 등과 산, 알칼리계 세제 등을 사용하지 마십시오.
(청결 및 제품 보호를 위해 중성세제를 사용하여 세척하십시오)


⚠ [경고] 본 제품은 수분이 많은 환경에서는 녹이 발생할 수 있음.



소비자의 안전을 위해서 반드시 준수하십시오.
안전수칙을 무시한 사고에 대해서 당사의 법적 책임은 없습니다.


제품 설치방법

1. 사용상 주의사항을 숙지하시고, 확인사항에 따라 설치 환경을 점검하고 위치를 설정 하십시오.
2. 설치 위치 천정 및 바닥의 단착면을 깨끗히 청소 후 닦아 주십시오
3. 구성품을 확인해 주십시오.(1쪽참조)
4. 아래 그림대로 상단지지대에 스프링을 삽입하고 볼트를 이용하여 상단파이프와 조립합니다. 그리고 하단 지지대는 리프트 피스톤을 시계방향으로 돌려 조립하여 완성합니다.

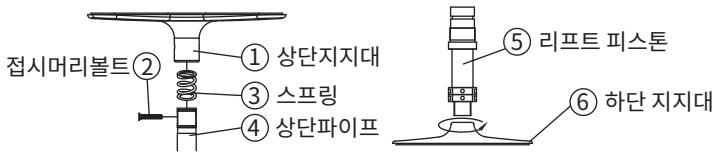


5. 상단 커플링을 눌러 상단파이프를 빼내어 알맞은 높이로 고정합니다.

-커플링이 홈위치에서 고정되지 않을 시 파이프를 돌려주어 파이프의 홈과 커플링의 홈이 일직선이 되도록 그림과 같이 일치시켜 줍니다.

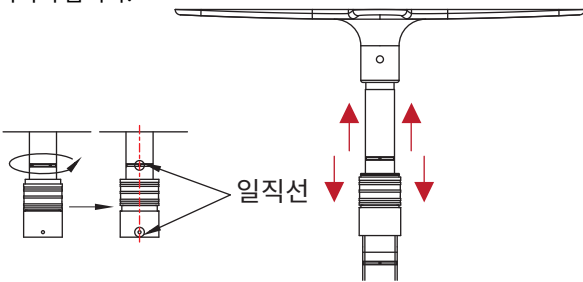


6. 중단 커플링을 눌러 중단 파이프를 빼내어 천장에 닿도록 고정합니다.

-커플링이 홈위치에서 고정되지 않을 시 파이프를 돌려주어 파이프의 홈과 커플링의 홈이 일직선이 되도록 그림과 같이 일치시켜 줍니다.

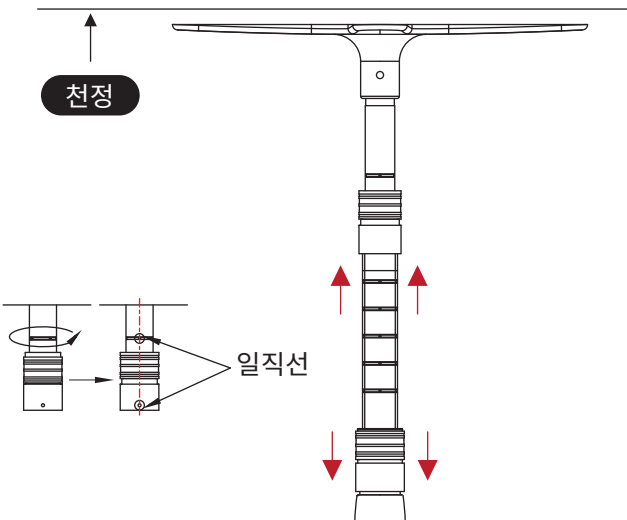


7. 하단 파이프를 잡고 들어 올린 후 디자인 너트를 반시계 방향으로 돌리면서 상부 지지대가 천정에 고정되도록 단단히 조여줍니다.


8. 디자인 너트를 동봉된 조임용지그를 이용하여 반시계 방향으로 돌리면서 상단 스티커가 보이지 않을때까지 최대한 조여줍니다.

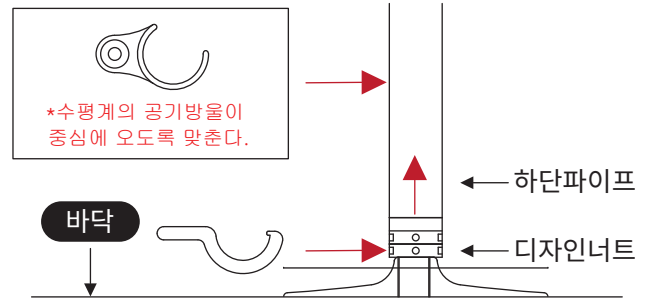

9. 상단 커플링에 안전클립을 그림과 같은 위치에 결합하여 줍니다. 중단도 동일하게 조립합니다.

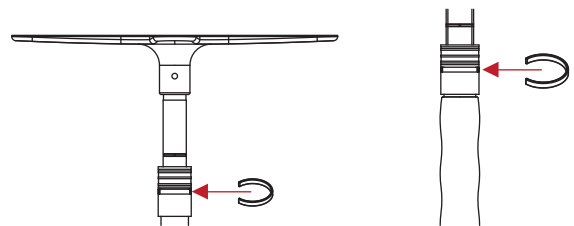

10. 중단 실리콘 커버와 하단 실리콘 커버를 그림의 방향대로 각각 위치에 맞추어 내려줍니다.

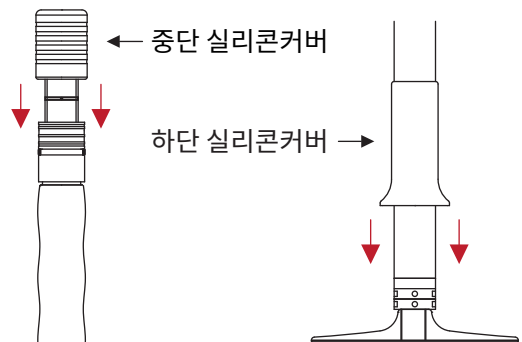

11. 안전손잡이 설치 후, 손잡이의 중심에 힘을 가하여 안전하게 고정이 되었는지 확인합니다. (제품 설치후 천정지지대와 바닥지지대가 움직이지 않아야 합니다.)

제품보증서

수호천사 안전손잡이 서비스 안내

본 제품은 가정용이며 제품의 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장에 대하여 구입일로부터 1년간 보증하여 드립니다.

- 본 제품은 세비앙(주)의 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 제품 고유하자에 의한 고장에 대해서는 보증기간 내에 새 제품으로 교환 및 수리해 드립니다.
- A/S 발생 및 상담은 구입 대리점 또는 본사 수호천사 사업부로 연락해주세요.
- 세비앙 수호천사 안전손잡이는 소비자기본법에 의거하여 아래와 같은 조건으로 보증하여 드립니다.
- 수리 또는 교환을 원할 때는 제품 보증서를 꼭 제시해 주세요.
- 보증서는 재발행하지 않으므로 잘 보관해 주세요.

※ 본 보증서는 보증기간 내 무상수리를 받을 수 있는 증서이므로, 제품 구입 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주세요.

모델명		구입일		시공자(업체)	
판매자상호 및 연락처				고객 성명	
고객 주소				고객 연락처	

유상 서비스

※ 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 수리 비용이 발생할 수 있습니다.

- ① 제품의 이동, 이사 등으로 인한 재설치 시
- ② 소비자가 직접 설치한 제품 또는 설치 미숙으로 인한 재설치 요청 시
- ③ 소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
- ④ 본사에서 지정하지 않은 부품 사용으로 인한 고장 발생 시
- ⑤ 안전손잡이 고유 용도 이외의 사용으로 인한 고장 발생 시

※ 부품보유기간(단종 후 5년) 이후 수리가 불가능할 수 있습니다.

※ 교환 및 환불은 '소비자 피해보상 규정'에 준합니다.

제조원 : 세비앙(주)

고객 상담 및 A/S 센터 : 070-4667-5004

경기도 광주시 오포읍 봉골길 164-11

www.1004angel.com